



AP QUATBLEND 8

DESCRIPCIÓN

AP-QUATBLEND 8 es un producto biodegradable concentrado que actúa como desinfectante, limpiador y desodorizante de pH neutro, diseñado para su uso en superficies quirúrgicas y médicas, así como en el sector sanitario en general. No requiere mezclas adicionales (salvo agua) y es eficaz contra una amplia gama de bacterias —incluido el COVID-19—, así como contra gérmenes y otros microorganismos patógenos.

USOS DEL PRODUCTO

AP-QUATBLEND 8 es un limpiador y desinfectante apto para todas las áreas de hospitales, consultorios médicos y salas de tratamiento médico. Puede utilizarse para la limpieza y desinfección de mascarillas protectoras y de superficies de tratamiento. El producto también es adecuado para el sector alimentario (p. ej., cocinas de hospitales o restaurantes) y es eficaz contra: bacterias, levaduras, virus con envoltura (incluidos VHB, VHC y VIH) y poliomavirus. No contiene aldehídos ni perfumes. Asimismo, el producto es apto para una desinfección rápida (5-10 minutos).

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- AP-QUATBLEND 8 es seguro de usar y limpia y desinfecta una variedad de instalaciones y superficies.
- El producto es apto para uso normal (no delicado); sin embargo, se recomienda utilizar guantes de plástico y gafas protectoras durante su manipulación prolongada.
- No ingerir; en caso de ingestión, no provocar el vómito y buscar atención médica.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- El producto no deja residuos, dejando los suelos y superficies con una apariencia y sensación de limpieza y fresca.
- Evitar el contacto directo prolongado con la piel y, especialmente, con los ojos.
- En caso de contacto con los ojos y/o la piel, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.

- Utilizar en áreas ventiladas.
- AP-QUATBLEND 8 no se considera tóxico por ingestión y no contiene sustancias cancerígenas conocidas.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto está concentrado para su uso en entornos de atención sanitaria; en dispositivos médicos y para la prevención de infecciones cruzadas hospitalarias en todas las áreas del hospital y consultorios médicos.

No solo es adecuado para su aplicación mediante pulverización en la limpieza de superficies, sino que también es eficaz para el fregado de suelos y limpieza de superficies con trapos.

Diluir en agua corriente hasta un máximo del 50 % para mantener el estándar médico requerido y no afectar la eficacia de la solución diluida.

INGREDIENTES

Producto químico: N.º CAS%

Alcohol isopropílico 67-63-012

Mezcla de biosurfactantes 25154-54-58

Mezcla de compuestos cuaternarios 8001-54-55

Inerte N/A77

DETALLES FÍSICOS Y QUÍMICOS

- **Apariencia y olor** _____ *líquido no viscoso con olor a alcohol, color azul*
- **Punto de ebullición** _____ *> 82 °C*
- **Solubilidad en agua** _____ *totalmente soluble*
- **pH** _____ *7 – 8*
- **Densidad** _____ *0,79 – 0,99 g/mL*
- **Ligeramente volátil**
- **Punto de inflamación** _____ *19 °C*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) antes de utilizar este producto.
- Arupro Chemicals no asume responsabilidad alguna por lesiones, daños o pérdidas resultantes del uso inadecuado del producto.
- Fecha de emisión: agosto de 2026. Revisado por Rómulo Hernández, Licenciado en Ingeniería Química, MBA, Universidad de Tulane.
- Preparado por: Departamento Técnico de Arupro Chemicals.
- **NOTA:** Esta información se basa en resultados de investigación y desarrollo, y puede considerarse fiable.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envase de 1 galón